


水素ガス生成器

Lita Air

取扱説明書

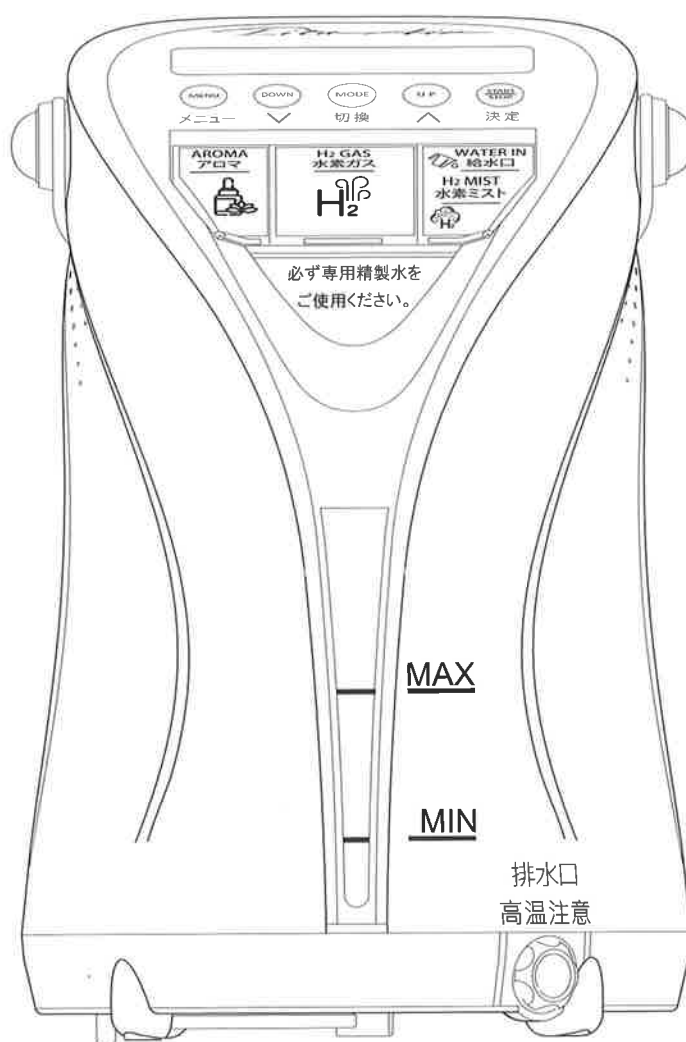

ご使用前に取扱説明書（以降「本書」と記載）をよくお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にお使いください。

正しく使用されなかった場合、ケガをする恐れがございます。

また、水素ガス生成器LitaAir（以降「本製品」と記載）を他人に引き渡す際は、この取扱説明書を必ず添付してください。


仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

目 次

目次・製品構成	P1
各部名称について	P2
安全上のご注意	P3～P4
各部機能について	P5
使用前の準備方法	P6
各モードについて	P7
各モードの使用方法	P8～11
設定の変更方法	P12
お手入れ及び保管方法	P13～14
エラー発生時の対処法	P15
仕様	P15

製品構成

基本セット

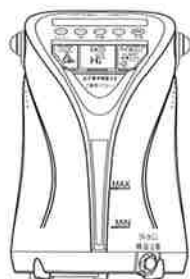

水素ガス生成器
Lita Air 本体



電源コード



取扱説明書



鼻カニューレ



注水ロート


別売オプション品



マスクカニューレ




口腔カニューレ

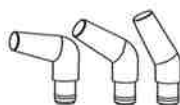

ミストパーツ3種




給水キャップ
2個セット

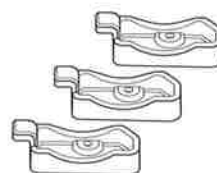



アロマケース3個セット
(コットン20枚入)
※レンタルユーザーは
使用いただけません。

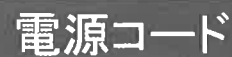前面





安全上のご注意

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。
また、本書はいつでもご覧いただけるところに保管してください。
本書はお客様や周囲の方への危害及び財産への損害を未然に防止するために、
危険を伴う操作や、取り扱い方法について以下のように区分し、説明しています。

 警告	「誤った取扱いにより〈重度な物的損害〉だけでなく、〈重傷、死亡〉にも繋がる内容」を示します。
 注意	「傷害または物的損害が想定される内容」を示します。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。


 安全実行	「安全にお使いいただくために必ず守る行為」を示します。
 禁止	「絶対にやってはいけない禁止行為」を示します。



「誤った取扱いにより〈重度な物的損害〉だけでなく、
〈重傷、死亡〉にも繋がる内容」を示します。



- ◇ 洗浄などのお手入れ時は、必ず主電源を切り電源コードを抜いてください。
- ◇ 電源コードを抜く際は、電源プラグの先端を持って引き抜いてください。
- ◇ コンセントや電源プラグにホコリやゴミ・水気が付着していないことを確認してください。
- ◇ 使用の際は、電源コードの接続部がゆるくなっていないこと・傷がないことを確認してください。
- ◇ 煙・異臭・異音などの異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、主電源をOFFにして、電源コードを抜いてください。
- ◇ 本製品使用直後は、排水口から高温の水が排出されます。時間をおいてから排水してください。
- ◇ アロマモードにてアロマオイルを使用される際は、ご自身の身体にあったものを使用してください。
- ◇ LitaAir専用精製水(以下「専用精製水」と記載)は、主電源をONにしていた場合、10日を目安に入れ替えて使用してください。
主電源をOFFにしていた場合は、1日～2日を目安に入れ替えて使用してください。

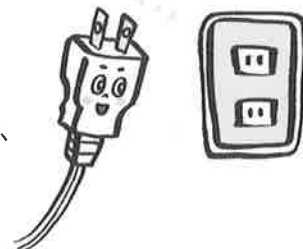

- ◇ 本製品使用時は火気厳禁です。火の近くや喫煙時は使用しないでください。
- ◇ 水素ガスを保存容器などに溜めないでください。
- ◇ 本体に水をかける、水に浸す、水洗いや濡れた手で電源プラグを触るなどの行為はしないでください。
- ◇ 他社の水素ガス生成器との併用はしないでください。
- ◇ 空気が密閉されるような場所(密室)では使用しないでください。
- ◇ アース線を電源プラグと一緒にコンセントへ差さないでください。
- ◇ 各力ニューレを使用しながらの睡眠はしないでください。
- ◇ 本製品使用時に、過度な吸入をしないでください。



安全上のご注意



警告

告：「誤った取扱いにより〈重度な物的損害〉だけでなく、
〈重傷、死亡〉にも繋がる内容」を示します。



◇ 以下の方は医師と相談の上使用してください。

使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

○ 喘息や呼吸器に疾患のある方

○ 鼻粘膜・口腔内・耳に疾患がある方

○ 血圧や心臓に異常がある方

○ その他医師の治療を受けている方、医療機関で治療中の方、服薬中の方、アレルギーのある方

○ 妊娠している方、授乳中の方

○ 特定の病気をお持ちでなくても、身体に何らかの異常を感じる方

◇ 身体の不自由な方が本製品を使用する場合、必ず介助をする方が付き添ってください。



◇ 本製品は乳幼児の手の届く所での使用・保管や、お子様だけでは使用しないでください。

◇ 付属の電源コード以外は使用しないでください。

◇ 本製品を傷つけたり、分解・改造・修理はしないでください。

◇ 電源コードを無理に曲げる・ねじる・引っ張る・加熱・タコ足配線はしないでください。



注意

意：「傷害または物的損害が想定される内容」を示します。



◇ 水素ガスは自然呼吸に合わせて吸入してください。

◇ 各力ニューレのチューブに結露などで水が入った場合は、内部の水を抜き、風通しのよい場所で十分に乾燥させてください。

◇ 必ず規定水位を守ってください。

◇ 虫やホコリなどが入らないように保管してください。

◇ 使用中に本製品が転倒した場合は、使用を中止して電源プラグをコンセントから抜いてください。



◇ 本製品の上に物を置いたり、不安定な場所や水に濡れた場所では使用しないでください。

◇ スイッチを強く押したり、電源コードを引っ張ったりしないでください。

◇ 高所や不安定な場所での使用・設置・保管はしないでください。

◇ 人が通行する場所への配線、設置などはしないでください。

◇ 本製品の電源は100～240Vのユニバーサル仕様になっておりますが、日本国内での使用を対象として設計・製造しているため、海外では使用しないでください。

◇ 本製品のお手入れをする際は、シンナー・アルコール・ベンジン・スプレー式クリーナーなどを使用しないでください。

◇ 本製品を逆さまにしたり、落とす・ぶつける・倒すなどの衝撃を与えないでください。

◇ 本製品に水が入っている状態での移動、輸送は行わないでください。

◇ 本製品は暖房器具の近くや高温になる場所、直射日光の当たる場所、湿度の高い場所での放置・保管はしないでください。

◇ 本製品を指定の目的以外では使用しないでください。

◇ 専用精製水以外は使用しないでください。


免責事項について

◇ 火災・自然災害または暴動などの行為、その他の事項において、お客様の故意または過失・誤用・その他の異常な条件下での使用時に生じた損害に関して、当社では一切責任を負いかねます。

◇ 本製品本体底面にはゴム足が使用されています。ゴム足による接地面の変色などについて一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各部機能について

基本画面と操作ボタン説明

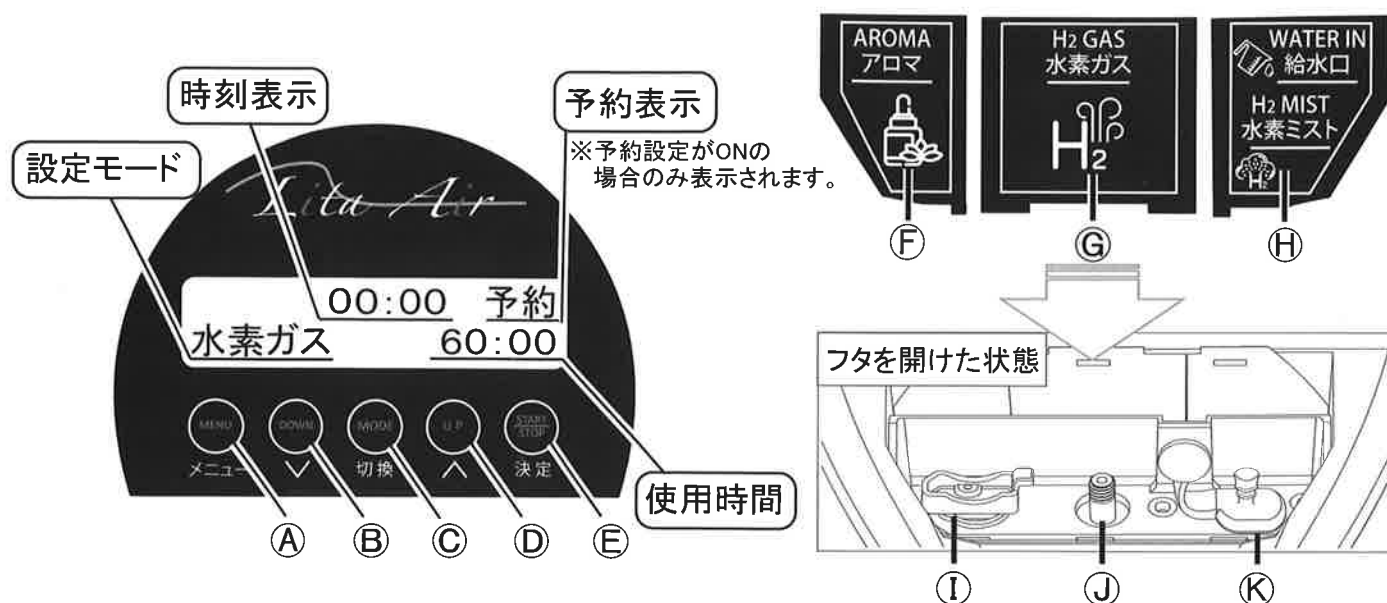

④ MENU (メニュー)

【予約タイマー/自動洗浄/時間設定/言語変換】の設定変更時に使用します (P12参照)。バージョンとシリアルを表示することも可能です。

⑤ DOWN (∨)

予約タイマーのON/OFFや、時間と言語変換時に使用します。

⑥ MODE (切換)

水素生成の各モードが切換できます。

モード	生成時間 (UP/DOWNで変更)	LED点灯色
水素ガス	15分 (ビギナーモード) /30分/45分/60分	濃青色
水素ミスト	30分/60分/120分/180分	水色
アロマ	30分/60分/120分/180分	濃緑色
水素ガス&アロマ	15分/30分/45分/60分	黄緑色
水素ミスト&アロマ	30分/60分/120分/180分	紫色

⑦ UP (∧)

予約タイマーのON/OFFや、時間と言語変換時に使用します。

⑧ START/STOP (決定)

作動させるためのスタート/ストップや、各操作時の決定に使用します。

⑨ ① アロマケース設置口

アロマケース (別売オプション品) を設置し、アロマの香りを拡散するエアーの噴出口です。

⑩ ② 水素ガス噴出口 / カニューレ接続口

水素ガスの噴出口です。水素ガス吸入用の各カニューレを接続します。

⑪ ③ 水素ミスト噴出口 / 給水口 (給水キャップ)

水素ミストの噴出口および給水口です。ミストパーツ3種 (別売オプション品) を接続する場合はこちらに差し込みます。


使用前の準備方法

本製品をご使用いただく前の準備方法についてのご案内です。

本製品は除菌用LEDライトを内蔵しており、主電源をONにしている限りは除菌作用が続きますが、主電源をOFFにしていた場合は、自動洗浄（P13参照）を行ってからご使用ください。

電源を入れる

- ① 本体を平らで安全な場所に設置してください。
- ② 電源コードを本体にしっかりと奥まで差し込んでください。

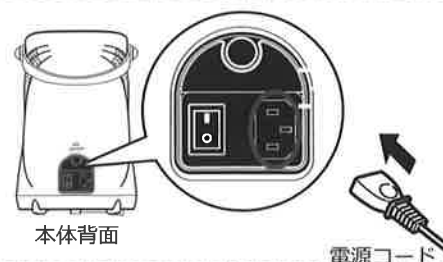

- ③ 電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込んでください。
※アース線を電源プラグと一緒にコンセントへ差し込まないでください。
発火する恐れがあります。




- ④ 背面の主電源スイッチをONにしてください。
※水が入っていない状態で電源を入れると、「エラー02 水不足検出」が表示されます。下記の手順にて給水を行ってください。




給水をする ※必ず専用精製水をご使用ください。

- ① 給水口のフタを開けます。

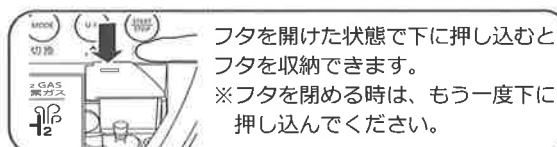


- ② 給水キャップのつまみを持ち、外してください。
※給水キャップ開閉の際、給水キャップを強く引っ張らないようご注意ください。

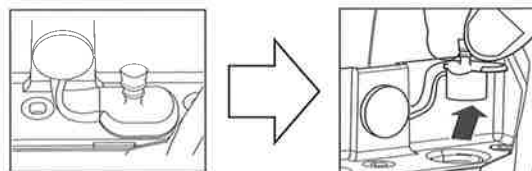

- ③ 注水ロートを給水口に差し込みます。



- ④ 水量表示窓のMAX～MINの間に専用精製水を注いでください。
※給水口には専用精製水以外を入れないでください。
故障の原因となります。
※誤って専用精製水以外の水を入れた場合は、水を専用精製水に交換しエラーが解消されるまで自動洗浄（P13参照）を行ってください。

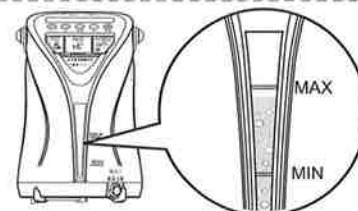

- ⑤ 給水が終わりましたら給水キャップを閉めてください。

初めて本製品を使用される場合は、ご使用前に必ず自動洗浄（P13参照）を行ってください。

各モードについて

各モードについてのご案内です。

設定方法・使用方法は次のP8よりご説明いたします。

水素ガスモード

基本使用モードです。カニューレから水素ガスを吸入することができます。

初めて使用される方・しばらく使用されていない方(ビギナーモード)

初めて水素ガスモードを使用される方や、しばらく使用されていない方は、15分設定の「ビギナーモード」をご利用ください。

ビギナーモードで1週間ほど体を慣らし、徐々に使用時間を増やしてください。

※使用感には個人差があります。違和感を感じた場合は直ちに使用を中止し、症状によっては医師の判断を仰いでください。



水素ミストモード

水素ミストを部分的にあてていただくモードです。

お顔の美容ケアなどに使用していただくことができます。



アロマモード

別売オプション品が必要です

アロマオイルの香りを拡散するディフューザーモードです。

お気に入りの香りをお楽しみいただくことができます。



水素ガス&アロマモード

別売オプション品が必要です

水素ガスと、アロマの両方が使用できるモードです。

アロマの香りをお楽しみいただきながら、水素ガスを吸入できます。

水素ミスト&アロマモード

別売オプション品が必要です

水素ミストと、アロマの両方が使用できるモードです。

アロマの香りをお楽しみいただきながら、水素ミストでお顔の美容ケアなどに使用していただくことができます。

「アロマモード」「水素ガス&アロマモード」「水素ミスト&アロマモード」を使用される方


- ・アロマオイルを使用される際は、ご自身の身体にあったものを使用してください。
- ・レンタルでご使用の方は「アロマモード」「水素ガス&アロマモード」「水素ミスト&アロマモード」を使用いただけません。

各モードの使用手法

水素ガスモード

- ① 使用前の準備方法(P6参照)を行ってください。
- ② 本製品専用の鼻カニューレまたは、別売オプション品のマスクカニューレ・口腔カニューレを準備し、装着します。
※各カニューレを使用しながらの睡眠は絶対にしないでください。

◇ 鼻カニューレ

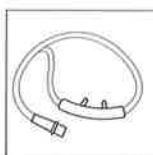

- ① 鼻カニューレの上下を確認し、鼻孔挿入部を自分の方に向くように鼻孔内に装着します。
- ② チューブを両耳に掛け、頬から顎下に持っていきます。
- ③ スライドリングを調整して鼻カニューレを固定してください。
※スライドリングの締めすぎにご注意ください。



◇ マスクカニューレ

別売オプション品



- ① マスクカニューレをチューブに接続します。
- ② マスクカニューレを広げてアルミ部分で幅を調節します。
- ③ マスクカニューレを鼻の位置にあわせて顔に当て、ゴムを後頭部にまわします。
- ④ ゴムの端を引っ張り、マスクカニューレが顔に密着するように調節します。



◇ 口腔カニューレ




別売オプション品



- ① 口腔カニューレをチューブに接続します。
- ② 口腔カニューレを軽く歯ではさむようにして咥えます。
※誤飲に注意してください。
※口腔カニューレを使用の際は鼻呼吸をしてください。




- ③ 水素ガスのフタを開けます。

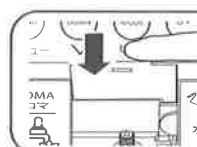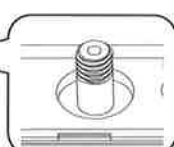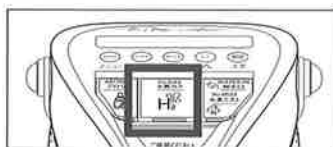


フタを開けた状態で下に押し込むとフタを収納できます。
※フタを閉める時は、もう一度下に押し込んでください。

- ④ 水素ガス噴出口にカニューレを奥までしっかり差し込みます。

※水素ミスト噴出口の給水キャップを外している場合、必ず給水キャップを閉めてください。

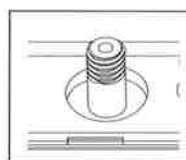

- ⑤ MODEボタンで水素ガスを選択します。

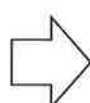

- ⑥ UP/DOWNボタンで使用時間(P5参照)を変更します。


※初めて水素ガスモードを使用される方やしばらく使用されていない方は、15分設定の「ビギナーモード (P7参照)」をご使用ください。



または



- ⑦ STARTボタンを押すと作動します。

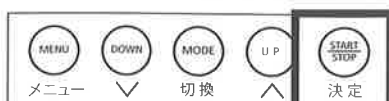


各モードの使用法

水素ミストモード



① 使用前の準備方法(P6参照)を行ってください。

② 水素ミストのフタを開けます。

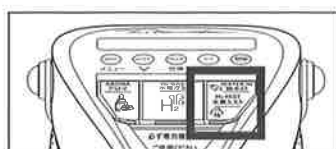

フタを開けた状態で下に押し込むとフタを収納できます。
※フタを閉める時は、もう一度下に押し込んでください。


③ 水素ミスト噴出口の給水キャップのつまみを持ち、外します。

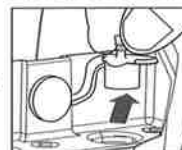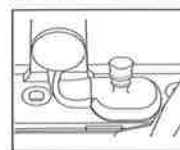

ミストの噴出角度を調整する際は、別売オプション品のミストパーツをご使用ください。

◇ ミストパーツ




別売オプション品

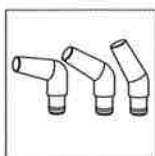

お好きな角度のミストパーツを、水素ミスト噴出口の接続部に差し込みます。





④ 水素ガスのフタを開けます。

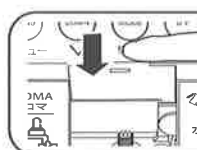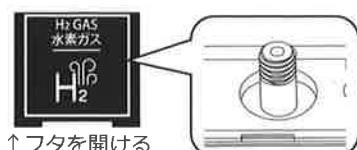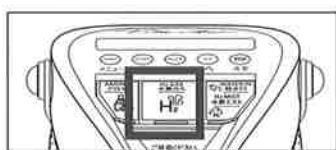

フタを開けた状態で下に押し込むとフタを収納できます。
※フタを閉める時は、もう一度下に押し込んでください。

⑤ 水素ガス噴出口に外した給水キャップを差し込みます。

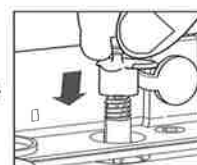
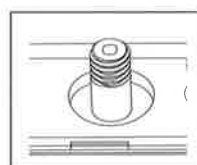


⑥ MODEボタンで水素ミストを選択します。




00:00
水素ミスト 60:00

⑦ UP/DOWNボタンで使用時間(P5参照)を変更します。

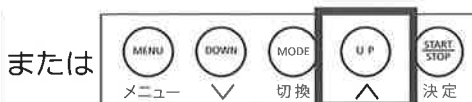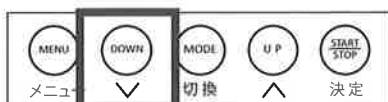

または

⑧ STARTボタンを押すと作動します。

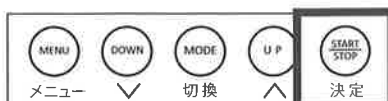

※使用後、水素ミスト噴出口に給水キャップを閉める際は奥まで差し込みすぎないようにご注意ください。

各モードの使用法

アロマモード

別売オプション品が必要です

- ・ レンタルユーザーは「アロマモード」を使用いただけません。
- ・ アロマオイルを使用される際は、ご自身の身体にあったものを使用してください。


① 使用前の準備方法(P6参照)を行ってください。

- ② ・ 本製品専用のアロマケース (別売オプション品)
・ 本製品専用のコットン (別売オプション品)
を準備します。




③ アロマケースにコットンを設置し、アロマオイル3滴を目安に滴下してください。


※必ずアロマケースを本体から取り外した状態で滴下してください。本体にアロマオイルが付着すると故障の原因となる可能性があります。

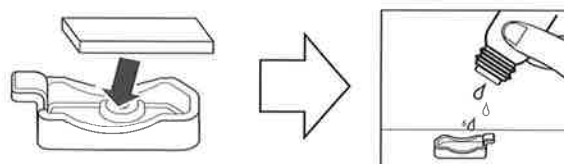


④ アロマケース設置口のフタを開けます。

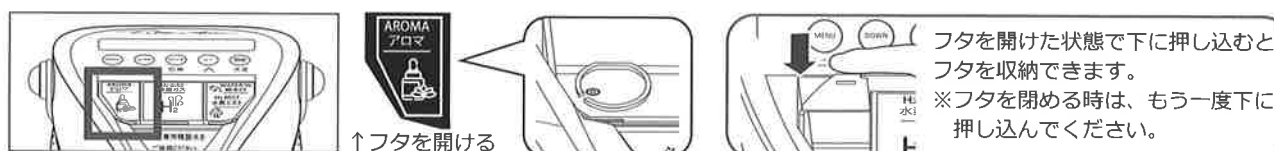


⑤ アロマケースを設置場所へ差し込みます。

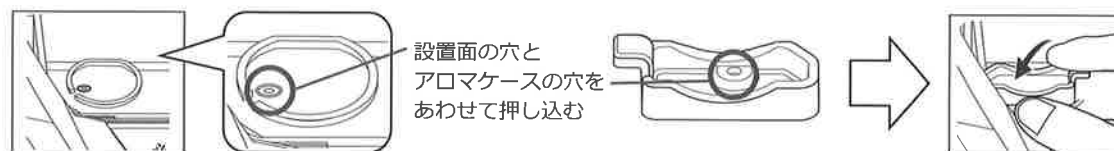


⑥ MODEボタンでアロマを選択します。

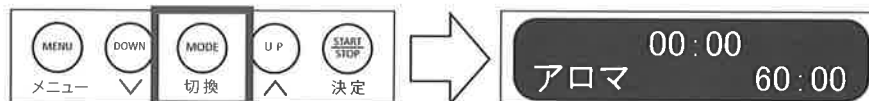

⑦ UP/DOWNボタンで使用時間(P5参照) を変更します。

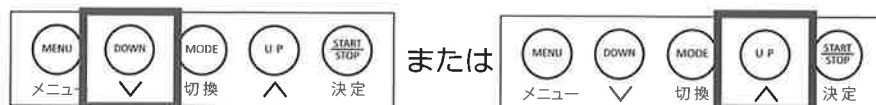

⑧ STARTボタンを押すと作動します。

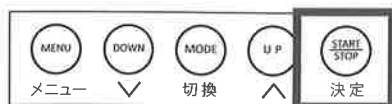

給水口・アロマケース設置口に直接アロマオイルを入れないでください。
故障の原因となります。


各モードの使用法

水素ガス & アロマモード


別売オプション品が必要です

- ・ レンタルユーザーは「水素ガス & アロマモード」を使用いただけません。
- ・ アロマオイルを使用される際は、ご自身の身体にあったものを使用してください。

- ① アロマモード（P10参照）の手順①～⑤を行ってください。
- ② 水素ガスモード（P8参照）の手順①～④を行ってください。
- ③ MODEボタンで水素ガス & アロマを選択します。

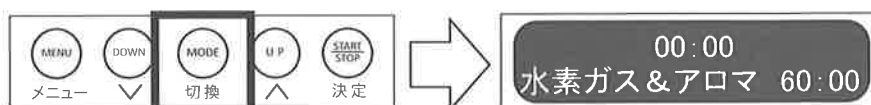

- ④ UP/DOWNボタンで使用時間(P5参照) を変更します。

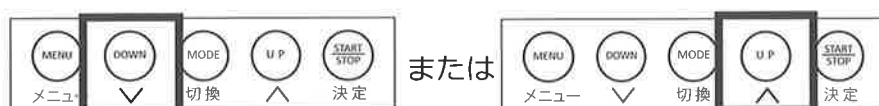

- ⑤ STARTボタンを押すと作動します。



水素ミスト & アロマモード


別売品オプションが必要です

- ・ レンタルユーザーは「水素ミスト & アロマモード」を使用いただけません。
- ・ アロマオイルを使用される際は、ご自身の身体にあったものを使用してください。

- ① アロマモード（P10参照）の手順①～⑤を行ってください。
- ② 水素ミストモード（P9参照）の手順①～⑤を行ってください。
- ③ MODEボタンで水素ガス & アロマを選択します。



- ④ UP/DOWNボタンで使用時間(P5参照) を変更します。

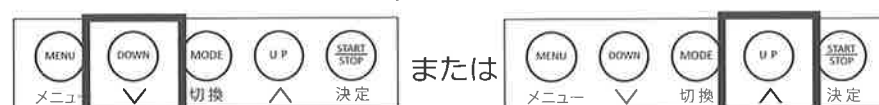

- ⑤ STARTボタンを押すと作動します。



※使用後、水素ミスト噴出口に給水キャップを閉める際は奥まで差し込みすぎないようにご注意ください。

設定の変更方法

設定変更や便利な機能についてのご案内です。

ミュート(消音)設定

「水素ガス」などの各モードが表示された状態でUP/DOWNボタンを同時に5秒程度長押しすると、ボタン操作音をミュートにできます。

※エラー音・アラーム音はミュートにできません。



予約タイマー機能


設定したモードをお好みの時刻に開始することができます。

予約可能なモードは水素ミスト・アロマ・水素ミスト&アロマの3種類です。


- ① MENUボタンを押し、予約タイマーを表示します。



- ② UP/DOWNボタンを押し、ONの状態に切り替え
STARTボタンを押します。

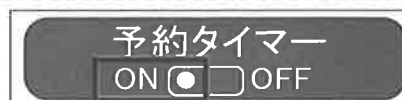

- ③ 予約モードをUP/DOWNボタンで選択し、
STARTボタンを押します。
※予約可能なモードは水素ミスト・アロマ・
水素ミスト&アロマの3種類です。

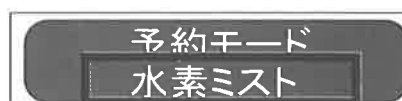

- ④ 使用時間をUP/DOWNボタンで選択しSTARTボタンを押します。
※使用時間は30・60・120・180分間の4種類です。

- ⑤ 開始時間をUP/DOWNボタンで数字変更→STARTボタンで決定し、一桁ずつ設定します。

- ⑥ 予約した時刻になると、「ピッピッ」とアラームが単音で12回鳴り、お知らせいたします。
※STARTボタンを押すとアラーム音が停止されます。
※予約設定がONになっている場合、シリアル番号の表示画面(P15参照)で静止していると
画面が切り替わり、予約事項が繰返し表示されます。

予約をキャンセルする

手順①の予約タイマーでOFFを選択(UP/DOWNボタン)すると予約がキャンセルできます。

時間(時刻)設定


- ① MENUボタンを押し、時間設定を選択し
STARTボタンを押します。



- ② 時刻をUP/DOWNボタンで数字変更→STARTボタンで決定し、一桁ずつ設定します。

言語変換

- ① MENUボタンを押し、言語変換を選択します。

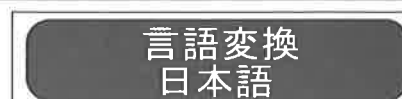

- ② UP/DOWNボタンで言語を変更し、STARTボタンで設定完了です。
※表示言語は日本語・中国語・英語の3種類です。

お手入れ及び保管方法

お手入れ方法や保管方法についてのご案内です。

自動洗浄

本製品は除菌用LEDライトを内蔵しており、主電源をONにしている限りは除菌作用が続きますが、主電源をOFFにしていた場合は、自動洗浄を行ってからご使用ください。


以下に当てはまる場合も、自動洗浄を行ってください。

- ・初めて本製品を使用する場合
- ・誤って専用精製水以外の水を入れた場合
- ・長期間使用せず保管する場合、また使用を再開する場合


※専用精製水の交換時も、自動洗浄を行うことをおすすめしております。

① 使用前の準備方法(P6参照)を行ってください。

② MENUボタンを押し、自動洗浄を選択してください。

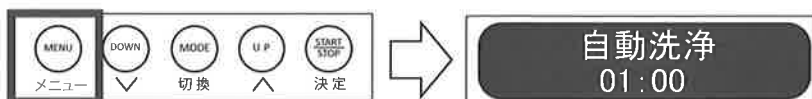

③ STARTボタンを押すと1分間の自動洗浄が開始されます。

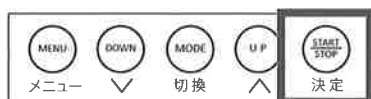


④ 洗浄終了後、画面表示に「タンク内の水を交換してください」と表示されます。

本体右下の排水口バルブを左に回して開け、水を排出してください。

※排水口バルブを開けるとすぐに水が出ます。必ず洗面台などの排水が可能な場所で行ってください。


※排水時は水素ミスト噴出口のキャップを外してください。

※長時間使用した後は、排水口から高温の水が排出されます。時間をおいてから排水してください。

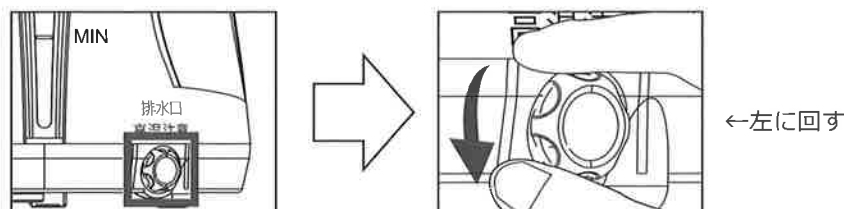

⑤ 【続けてご使用いただく場合】

給水口に注水ロートを差し込み、水量表示窓のMAX～MINの間に専用精製水を注いでください。

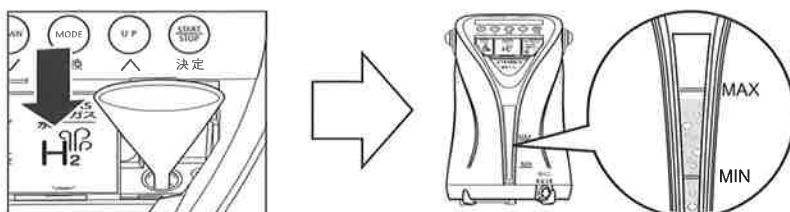

※タンク内の専用精製水を交換するまで他の機能は使用できません。

水素ガスモードなどを使用の際、誤って自動洗浄を行ってしまった場合は、一度主電源を

OFFにした後、再度主電源をONにしてご使用ください。中の専用精製水はそのまま使用可能です。

【使用せず保管する場合】

給水口と排水口を開けた状態で、数日間風通しの良い日陰に置きタンク内を乾燥させます。

(本体にゴミが入らないよう給水口をガーゼ等で覆ってください。)

乾燥が終わりましたら日陰の風通しがよい場所で保管してください。

お手入れ及び保管方法

お手入れ方法

本 体

- ご使用後は、
 - ・ 本体表面
 - ・ 給水口/水素ミスト噴出口
 - ・ カニューレ接続口/水素ガス噴出口
 - ・ アロマケース設置口付近に付着した水分や汚れを柔らかい布で拭き取ってからフタを閉めてください。
- 本体のお手入れをする際は、シンナー・アルコール・ベンジン・スプレー式クリーナーなどを使用しないでください。
- お手入れ後は、高温多湿・直射日光を避け、風通しのよい場所で保管してください。

各カニューレ

- 鼻や口に直接装着する部分は特に汚れがたまりやすい為、アルコール、除菌ウェットティッシュ等でこまめに拭き、汚れが気になる時は水洗いをしてください。
- 使用後はカニューレ内の水をしっかり抜き、風通しのよい場所で十分に乾燥させてください。

ミストパーツ

別売オプション品

- 使用後はミストパーツ内の水をしっかり抜き、風通しのよい場所で十分に乾燥させてください。

アロマケース

別売オプション品

- 使用後はアロマケースを水洗いし、風通しのよい場所で十分に乾燥させてください。

こんなときは？

水素ガス、水素ミストが弱いと感じたときは・・・

使用していない噴出口のキャップがあいていませんか？

使用していない噴出口のキャップがあいていると、十分に空気が出ない（ミストが弱まる）場合があります。

水素ガスモード使用時には、水素ミスト噴出口にキャップを差し込んでください。

水素ミストモード使用時には、水素ガス噴出口にキャップを差し込んでください。

本体の温度が高くなっていますか？

- ・ 本体側面の通気口や、本体底面の排気口がふさがっていませんか？
- ・ 高温になる場所や、直射日光のあたる場所に本体を設置していませんか？

60分程度使用を停止するか、専用精製水を交換してください。


エラー発生時の対処法

本体に異常が検知された場合、故障原因をアラームとエラー表示でお知らせします。

エラー表示	エラー原因	対処方法
01	転倒検出	本製品を平らな場所においてください。
02	水不足検出	タンクに専用精製水を給水してください。 (LEDライトが青色に点灯すればご使用いただけます。)
03	不純物検出	専用精製水を交換し、自動洗浄 (P13参照) を行ってください。 (1～3回目安、エラー表示が消えればご使用いただけます。) ※仕様によっては TDS マークが表示され、アラーム (ピッと1回) が鳴る場合があります。その場合も専用精製水を交換し、自動洗浄 (P13参照) を行ってください。
04	水過多	タンク内の水が高水位を超えています。 余分な水を排水口から排出してください。
06	内部気圧上昇	給水キャップを開けてください。
05 07 08 09 10	内部異常	専用精製水を交換し、自動洗浄 (P13参照) を行ってください。 改善がない場合は、各問合せ先までご連絡ください。 <div>購入のお客様</div> 購入店へご連絡ください。 <div>レンタルのお客様</div> リタハートインターナショナル株式会社までご連絡ください。
11	内部温度上昇	タンク内部の温度が上昇しています。 60分程度使用を停止するか、専用精製水を交換してください。

- ※ 本体によって、エラー表示が一部異なる場合があります。
- ※ 上記対処方法でも改善がない場合は、各問合せ先までご連絡ください。
購入のお客様…購入店へご連絡ください。
レンタルのお客様…リタハートインターナショナル株式会社までご連絡ください。

■お問合せの際は、以下の方法にてシリアルナンバーを確認の上、ご連絡ください。

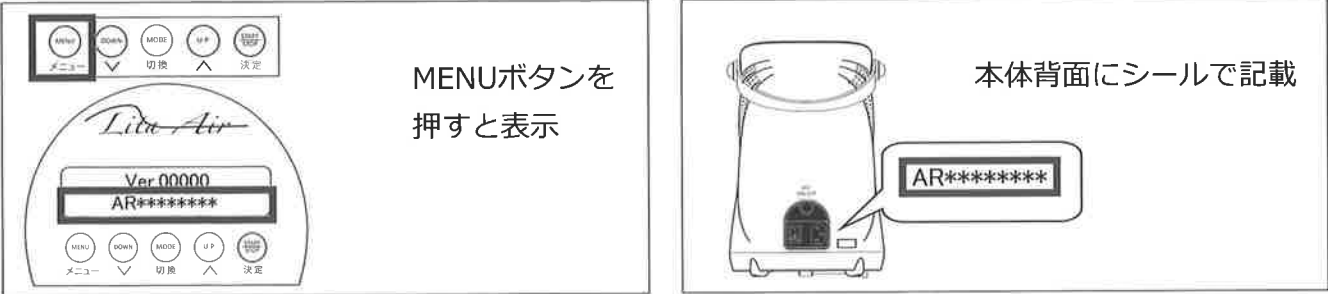

仕様

名 称	水素ガス生成器 Lita Air
寸 法	本体:幅185mm × 奥行185mm × 高さ280mm 電源コード:1.8m 鼻カニューレ:2.1m
重 量	本体:約2.7kg
電 源	AC100～240V・50/60Hz 消費電力:最大約120W
水素ガス発生量	100ml/min
水 素 濃 度	約3%±0.5%
使 用 水	Lita Air専用精製水
還 元 方 式	PEM式電解法
構 成 内 容	本体・電源コード・鼻カニューレ・注水ロート

*高温・多湿の場所を避け保管してください。